

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	KÂĞIT RULO KESME MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu MC.TL.14	Yayın tarihi 06.10.2017	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 10.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

1.AMAÇ:

Sterilizasyon işleminde kullanılan kâğıt rulo kesme makinesinin kullanım kriterlerini belirlemektir.

2. KAPSAM

Kağır rulo kesme işleminin aşamalarını kapsar.

3. KISALTMALAR

-

4. TANIMLAR

-

5. SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Birimi çalışanları sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

1. Sterilizasyon rulo yuvasına yerleştirilir.

2.Makinenin fişi prize takılır.

3.Önde bulunan kırmızı "AÇMA- KAPAMA" düğmesine basılarak cihaz açılır.

4."Sür" düğmesi kullanılarak sterilizasyon kâğıt rulo makine içine sürülür.

5.Cihazın sıcaklığına ulaşması için 3-5 dk. beklenir.

6.Isınan cihaz ekranında

A = İmalat Bilgisi

B = Bilgi Düzelt

C = Manuel İmalat

D = İmalata Başla

Yazıları belirir.

7. A = İmalat Bilgisi tuşuna basılarak sterilizasyon kâğıt rulo boy ayarlaması yapılır. Değerler girildikten sonra kare tuşuna basılarak girilen değerler onaylanır.

8. D= İmalata başla basılarak ayarlanan boyda sterilizasyon kâğıt rulo kesilmeye başlar.

Sterilizasyon rulo boy değerleri

10-7,5 mm sterilizasyon kâğıt rulo boy= 270 mm

Sterilizasyon kâğıt rulo tepsi boy= 450 mm

Sterilizasyon kâğıt rulo kaşık boy=200 mm

Sterilizasyon kâğıt rulo kulak boy=30