

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ULTRASONİK CİHAZI KULLANMA TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu MC.TL.16	Yayın tarihi 06.10.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 10.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

1.AMAÇ:

Aletler üzerinde bulunan organik atıkların uzaklaştırılmasıdır.

2.KAPSAM

Ultrasonik yıkama cihazının kullanım aşamalarını kapsar.

3.KISALTMALAR -----

4.TANIMLAR -----

5.SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon ünitesi çalışanları sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

- Merkezimizde kullanılan cerrahi el aletlerinin en kısa zamanda yıkama ve dezenfeksiyonu sağlanır.
- Cihazın suyu kontrol edilir.
- İçindeki suyun seviyesi cihazın iç tarafındaki çizgiye kadar su doldurulur.
- İçine uygun dezenfektan madde konulur.(Oran kullanılan dezenfektan maddeye göre değişebilir)
- Cihazın ön tarafında bulunan **AÇMA/ KAPATMA** düğmesine basılır.
- Kontrol panelinde sıcaklık, güç ve zaman ayarı bulunmaktadır. Güç (titreşim gücü) ayarlanır.
- Cihazın sıcaklığı kullanılan solüsyon özelliğine göre ayarlanır.
- Uygun sıcaklığa ulaşan cihaz içerisine uygun büyüklükteki sepetlerde yıkanacak aletler cihaz tabanına değmeyecek ve suyun üzerine çıkmayacak şekilde bırakılır.
- Yıkama işlemi bittikten sonra aletler durulanır, kurulama işlemi yapıldıktan sonra, paketleme bölümüne alınır.