

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	APEKS BULUCU CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu MC.TL.62	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 2

1.AMAÇ

Apeks bulucu cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5.SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

- 6.1.1. Açma kapama düğmesinden cihaz hazır konuma getirilir.
- 6.1.2. Ekran açıldıktan sonra cihazın başlığı ile devreyi tamamlayan dudak klipsi birbirine temas ettirilir.
- 6.1.3. Cihazın ekranında "ON" yazısı görüldüğü zaman dudak klipsi hasta ağızına yerleştirilir.
- 6.1.4. Başlığın ucuna takılan kanal egesi ile kanal boyu ekranda görülen göstergeye göre tespit edilir.
- 6.1.5. Dudak klipsi hastanın ağızından çıkarılır.
- 6.1.6. Dudak klipsi ve cihazın başlığı dezenfekte edilir. Kullanılan kanal egesi sterilizasyon ünitesine gönderilir.
- 6.1.7. Cihazın genel dezenfeksiyonu yapılarak kapatılır.

6.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

- 6.2.1. Teknik servis personeli fakültedeki tüm makine ve cihazların fakülte içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
- 6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU"na işler.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	APEKS BULUCU CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu MC.TL.62	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2 / 2

6.2.3.Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.

6.2.4.Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3. Apeks Bulucu Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1. Aylık Bakım:

6.3.1.1.Genel temizliği yapılır.

6.3.1.2.Çalışması kontrol edilir.