

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ASPIRATÖR CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu MC.TL.69	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/2

1.AMAÇ

Aspiratör cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5.SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

- 6.1.1. Cihazın fişi prize takılır.
- 6.1.2. "ON" yazılı düğmeye basılıp çalıştırılır.
- 6.1.3. Uzun aspiratör hortumuna aspirasyon sonda takılır.
- 6.1.4. Hastanın ağız veya burnunda biriken sekresyon boşaltılır.
- 6.1.5. Distile su dolu şişe içine aspirasyon sonda batırılır.
- 6.1.6. Hortumun içindeki sekresyon büyük kavonoza boşaltılır işlem iki üç kez tekrarlanır.
- 6.1.7. İşlem bittikten sonra "OFF" düğmesine basılarak makine kapatılır.
- 6.1.8. Kullanılan sonda atılır ve şişeler çıkartılıp temizlenir.

6.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

- 6.2.1. Teknik servis personeli fakültenin tüm makine ve cihazların fakülte içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
- 6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "FR-45 BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU"na işler.
- 6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.
- 6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza fakülte imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ASPİRATÖR CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu MC.TL.69	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2/2

giderilmesini sağlar. Arıza sonrası "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3. Aspiratör Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1. Aylık Bakım:

6.3.1.1. Cihazın temizliği yapılır.

6.3.1.2. Çalışması kontrol edilir.